

TECNOLOGIA THERMASS: funzionamento.

La reazione iniziale del tessuto alla tecnologia Thermass è di aumentare l'afflusso del sangue locale nel tessuto adiposo e di veicolare principi attivi con formulazione specifica, sia per il corpo che per il viso.

Parallelamente a questa azione vi è l'aumento della dissociazione dell'ossigeno a ossiemoglobina, con il conseguente aumento del metabolismo dei lipidi.

Inoltre, è stata incorporata un'azione meccanica per rompere fisicamente il gruppo delle cellule adipose e di allungare le fasce fibrose.

L'azione meccanica favorisce il drenaggio linfatico stimolando l'evacuazione dei grassi e parallelamente la riduzione della pressione atmosferica sulla superficie della pelle.



thermass
thermo dermo kinesi

- ✓ riduce gli effetti della cellulite già dalle prime sedute
- ✓ efficacia nel trattamento delle smagliature
- ✓ rimodella e tonifica
- ✓ azione anti-aging sul viso
- ✓ trattamenti rapidi e non invasivi

La riduzione della pressione esterna sulla pelle e sul grasso paragonata alla pressione interna del sangue ha lo scopo di aumentare ulteriormente l'afflusso del sangue locale (ipervascolarizzazione).

DOMANDE FREQUENTI

- Cos'è Thermass?

Thermass è un' innovativa apparecchiatura che, grazie alle comprovate tecnologie combinate (Radiofrequenza Bipolare, Infrarossi, Vacuum, Massaggio Endodermico e Veicolazione dei principi attivi) permette di trattare in modo sicuro e non invasivo gli inestetismi della cellulite, le adiposità localizzate, ridurre le circonferenze, rimodellare e ritonificare ogni parte del corpo.

- Il trattamento con Thermass è sicuro?

La tecnologia Thermass, rappresenta uno dei sistemi più sicuri ed efficaci per trattare tutti i tipi di pelle, anche quelle più scure, in qualunque periodo dell'anno. Per la salute non vi sono rischi risaputi, poiché, sia la Luce, sia la Radiofrequenza vengono usate senza rischi da decenni in medicina, chirurgia ed estetica.

- In che modo Thermass aiuta a migliorare l'aspetto della cellulite ed a ridurre le circonferenze?

Thermass, tramite un massaggio delicato, ed all'aspirazione pulsata e ritmica manipola meccanicamente i legami fibrosi, la pelle e lo strato di grasso. Nello stesso tempo fornisce, grazie alla Luce ad Infrarossi ed alla Radiofrequenza Bipolare, un effettivo riscaldamento al grasso sottocutaneo, aumentando il metabolismo delle cellule adipose. I legami si tendono, le cellule subiscono lisi (crollano) e sono assorbite e successivamente eliminate tramite le vie escretrici. Il risultato finale è un aspetto più liscio e più regolare della pelle e una riduzione generale della circonferenza.

- Perché Thermass è più efficace rispetto agli attuali trattamenti per la cellulite?

La vera rivoluzione ed unicità di Thermass sta nell'utilizzo combinato di diverse fonti di energia nello stesso manipolo. La combinazione di luce ed energie elettriche forniscono un calore intenso. In particolare l'energia della Radiofrequenza Bipolare agisce in profondità nel derma con un doppio effetto: da un lato lo stiramento e contrazione delle fibre collagene invecchiate e usurate, dall'altro la produzione di nuovo collagene da parte dei fibroblasti stimolati. Questo permette di evitare lo svuotamento del tessuto ipodermico, causa di cute rilassata e "pieghettata" e principale effetto collaterale del dimagrimento o trattamento dell'adipe. Il tutto si traduce in una pelle più tonica e liscia, anche in seguito a riduzione delle circonferenze, adiposità e cellulite. L'energia meccanica, inoltre, applicata tramite vacuum e a rulli, causa un allungamento fisico ed

indolore dei tessuti fibrosi. L'effetto di ogni singola energia combinata sinergicamente contribuisce ad aumentare i risultati finali.

- Quali sono i trattamenti e quali risultati possiamo aspettarci con Thermass?

Thermass non soltanto riduce, ma modella e ritonifica le aree trattate. Grazie ai suoi due applicatori appositamente studiati, uno per le aree più estese, come glutei, cosce, addome e uno per quelle più piccole, offre realmente la possibilità di trattare tutto il corpo, compresi punti critici. In recenti studi è stata notata una riduzione della cellulite del 75% e una diminuzione della circonferenza in media di 3,5/4,5 cm.

- Ogni quanto bisogna ripetere i trattamenti Thermass?

Sono stati riportati risultati soddisfacenti e visibili dopo 2 trattamenti a settimana per quattro settimane. Il ciclo di trattamenti completo comprende in genere 10 sedute con una frequenza di 2 a settimana. Successivamente sono previsti trattamenti di mantenimento da effettuare mensilmente, poi una volta ogni 6 settimane fino a uno ogni 3 mesi.

- Come si presenta il trattamento con Thermass, è doloroso?

La maggior parte dei pazienti trova il trattamento confortevole, come un massaggio caldo profondo e rilassante. E' normale avvertire una lieve sensazione di calore per alcune ore dopo il trattamento, come pure un arrossamento dell'area trattata.

- Cosa accade dopo il trattamento con Thermass?

Durante la procedura i livelli di confort sono alti. Si può notare un leggero aumento della produzione di urina dopo il trattamento. Questo accade perché le cellule che hanno subito lisi vengono assorbite ed espulse attraverso il sistema linfatico.